

Cartucho de Lavado AFIAS

USO PREVISTO

El Cartucho de Lavado **AFIAS** se utiliza para limpiar los adaptadores de punta AFIAS-6.

COMPONENTES

El **cartucho de lavado AFIAS** está compuesto por 'Soportes para cartuchos AFIAS', 'Tubos DDW con agua destilada-desionizada', 'Tubos con detergente' e 'Instrucciones de uso'.

- El tubo DDW, contiene agua destilada-desionizada y está cerrado herméticamente,.
- El tubo con detergente está lleno con una solución del 0,2% de Tween 20 y sellado con papel de aluminio.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Para uso exclusivo en diagnóstico *in vitro*.
 - Siga las instrucciones y los procedimientos descritos en estas "Instrucciones de uso".
 - El cartucho no debe utilizarse después de la fecha de caducidad.
 - Si este procedimiento no se realiza semanalmente, pueden obtenerse resultados incorrectos o inadecuados.
 - Recomendamos realizar este procedimiento semanalmente para evitar fallos inesperados.
 - Disponible sólo para AFIAS-6.
- ※ **No realice ninguna prueba durante 30 minutos después de lavar el adaptador de la punta.**

MATERIALES SUMINISTRADOS



REF SMFP-79

Componentes del Cartucho de Lavado **AFIAS**.

- Caja del Cartucho:
 - Soportes para cartuchos AFIAS 5
 - Tubos con agua destilada-desionizada 100
 - Tubos de extracción 100
 - Instrucciones de Uso 1

CONFIGURACIÓN DE LA PRUEBA

- Revise el contenido del **Cartucho de Lavado AFIAS**: 'Soportes para cartuchos AFIAS', 'Tubos con agua destilada-desionizada', 'Tubos con detergente' e 'Instrucciones de uso'.
 - El soporte del cartucho es reutilizable a menos que esté contaminado.
- ※ **Compruebe el color de cada tubo claramente antes de realizar las pruebas.**

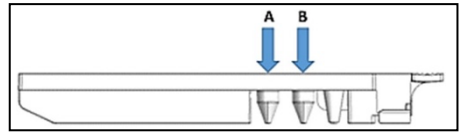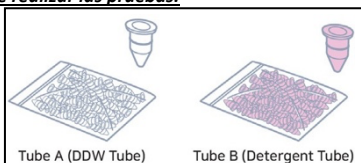

- ① Coloque un soporte AFIAS en una mesa plana.
- ② Inserte un tubo A (tubo con agua destilada-desionizada_blanco) en la posición A del soporte del cartucho.
- ③ Inserte un tubo B (tubo con detergente_rosa) en la posición B del soporte del cartucho.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Condición de almacenamiento	
Temperatura de almacenamiento	15 - 30 °C
Vida útil	60 meses
Nota	desechable

- ① Vaya a 'Mantenimiento' en secuencia en la pantalla principal.
- ② Pulse el botón 'Adaptador de la punta de lavado'.
- ③ Inserte el soporte para cartuchos preparado en la primera ranura del Soporte A.
- ④ Pulse el botón 'Start'.
- ⑤ El proceso de lavado se completará en 3 minutos.
- ⑥ Extraiga los tubos usados del marco del cartucho empujándolos y elimínelos en un contenedor para desechos de riesgo biológico.

Para obtener asistencia técnica, póngase en contacto con **Servicio Técnico de Boditech Med Inc.**

Tel.: +(82) -33-243-1400

Correo-e: sales@boditech.co.kr



Boditech Med Incorporated

43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon,

Chuncheon-si, Gang-won-do, 24398


República de Corea

Tel.: +(82) -33-243-1400


Fax: +(82) -33-243-9373

www.boditech.co.kr


Componentes de la Prueba

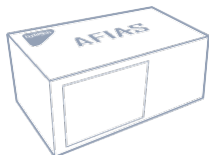


Caja del cartucho de lavado

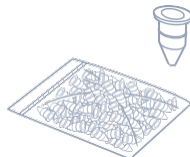


Tubo A (Tubo agua destilada-desionizada)

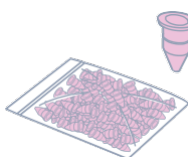

Tubo B (Tubo para detergente)

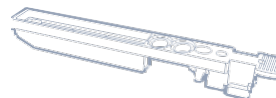


Soporte de cartuchos AFIAS-6

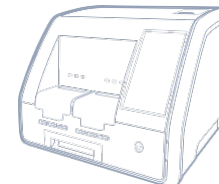


Preparación


1 Coloque un soporte para cartuchos AFIAS en una mesa plana

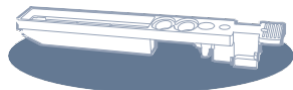

2 Inserte un tubo A (tubo agua destilada-desionizada) en la posición A del soporte para cartucho

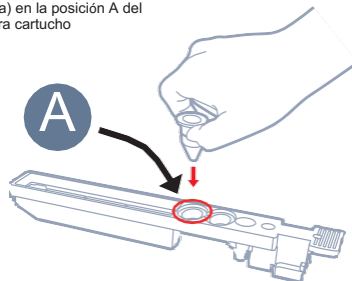


3 Inserte un tubo B (tubo para detergente) en la posición B del soporte para cartuchos

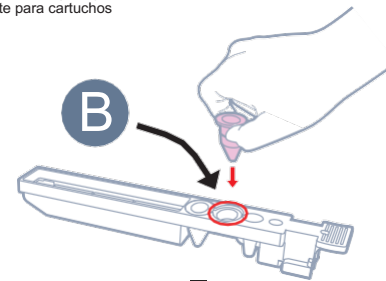


Procedimiento

1 Vaya a "Mantenimiento" **2** Pulse en "Adaptador de la punta de lavado"

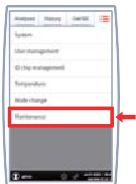

3 Inserte el soporte para cartuchos preparado en la primera ranura del Soporte A

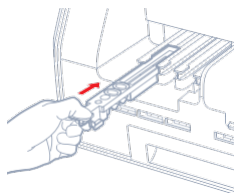

4 Toque el botón de inicio "Start"



5 El proceso de lavado se completará en 3 minutos



6 Extraiga los tubos usados del soporte del cartucho empujándolos y elimínelos en un contenedor para desechos de riesgo biológico



No realice ninguna prueba durante 30 minutos después del procedimiento

El soporte para cartuchos es reutilizable a menos que esté contaminado