

## DAS KLEEN

**REF** DAS2077 - DAS KLEEN

**IVD** Solo para uso diagnóstico *in vitro*



Consulte las instrucciones de utilización



Guardar a 2 - 8°C



### Uso previsto

DAS KLEEN está diseñada para limpiar las sondas en ZENIT UP, AP16 IF Plus, AP22 Speedy IF, AP22 Speedy, e instrumentos AP16 IF ELITE.

### Principio del ensayo

La solución DAS KLEEN se coloca en la posición especificada de acuerdo con el software para ZENIT UP, AP16 IF Plus, AP22 Speedy IF, AP22 Speedy, e instrumentos AP16 IF ELITE cuando se ejecuta diapositivas y reactivos ZENIT AMiDot. Se va a limpiar las sondas después de dispensación tampón de activación, diluciones de la muestra, la muestra diluida y dispensaciones conjugadas.

### Contenido del kit

**SOLN** **CLEAN**



1 vial DAS KLEEN (solución transparente, ácido oxálico), 100mL

1 prospecto de instrucciones

### Almacenamiento

DAS KLEEN deben guardarse a 2 - 8°C. Los reactivos son estables hasta las fechas de caducidad indicada en el frasco. No los congele.

No exponga los reactivos al calor, el sol ni iluminación potente durante su almacenamiento y utilización.

### Precauciones de procedimiento

Deje que los reactivos se atemperen a temperatura ambiente (18 - 25°C) durante dos horas como mínimo antes de usarlos.

No utilice el kit ni los portaobjetos después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. Los reactivos no utilizados son estables a 2 - 8°C durante un mes después de la primera apertura del recipiente. No obstante, una reutilización abundante puede aumentar el riesgo de contaminación del reactivo.

### Instrumentación

DAS KLEEN se puede utilizar con cualquier instrumento de diagnóstico capaz de ejecutar diapositivas IFA.

## Precauciones de seguridad

Sólo para uso diagnóstico *in vitro*.

Exclusivamente para uso profesional.

Su representante local puede proporcionarle las hojas de datos de seguridad.



DAS KLEEN contiene ácido oxálico.

Palabra Clave: Advertencia

Declaraciones de peligro:

H302 - Nocivo si se ingiere

H312 - Dañino en contacto con la piel

Consejos de prudencia:

P280 - Use guantes de protección/protección para los ojos/la cara.

P305 + P351 + P338 - EN LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer.

Proseguir con el lavado.



Cambridge Life Sciences Ltd.  
14 St. Thomas' Place  
Cambridgeshire Business Park  
Ely, Cambridgeshire CB7 4EX, UK



Glenbio Ireland Ltd.  
17B Fota Business Park  
Carrigtwohill  
Co. Cork, T45 PK77, Ireland  
T: +353 21 4 389980  
E: [regina@glenbio.com](mailto:regina@glenbio.com)  
[www.glenbio.com](http://www.glenbio.com)

A5211.01  
Abril 2023